



Artikel-Nr.: 1999901991

Abena Schnell-desinfektion

- umfassende Wirksamkeit gegen Bakterien und Viren
- gebrauchsfertig
- inklusive Sprühkopf
- BAuA Reg.Nr.: N-92141



Produktbeschreibung

Abena Schnell-desinfektion ist eine aldehydfreie, umfassend wirkende Sprühwischdesinfektionslösung für alkoholbeständige Oberflächen, Medizinprodukte und Gegenstände in medizinischen Einrichtungen. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig benetzen und ggf. mit einem hygienisch sauberen Einmaltuch verteilen. Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Das Präparat trocknet schnell ab. Nicht geeignet für die Abschlussdesinfektion semikritischer oder invasiver Medizinprodukte.

Besonderheiten



Produktspezifikationen

Zusammensetzung:	In 100 g sind als Wirkstoff enthalten 63,5 g Ethanol 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid
Farbe der Lösung:	Farblos/klar
Zustand:	Flüssig
pH-Wert:	11
Dichte:	Ca. 0,89 g/ml
Unterverpackung:	Flasche
Inhalt:	500 ml
Material:	HDPE
Farbe der Unterverpackung:	weiß
Umverpackung:	Karton

Wirksamkeiten

gem. EN Normen und VAH	Einwirkzeiten
Bakterizid, Levurozid (gem. EN 16615 (4-Feldertest), hohe Belastung)	1 Min.
Bakterizid (inkl. MRSA), Levurozid (gem. EN 13727/ EN 13624, hohe Belastung)	30 Sek.
Mykobakterizid, Tuberkulozid (inkl. M. avium und M. terrae) (EN14348, hohe Belastung)	30 Sek.
Fungizid (inkl. A. brasiliensis) (EN 13624, geringe Belastung)	5 Min.
Viruswirksamkeiten	
Viruzid wirksam	5 Min.
Wirksam gegen BVDV und Vaccinia Viren (DVV/RKI, mit 10% FKS Belastung)	1 Min.
Wirksam gegen Noroviren und Adenoviren (EN 14476, geringe Belastung)	5 Min.
Wirksam gegen Polioviren (EN 14476, geringe Belastung)	5 Min.
Wirksam gegen SV 40 (DVV/RKI, mit 10% FKS Belastung)	1 Min.
Wirksam gegen Noroviren und Adenoviren (prEN16777, geringe Belastung)	1 Min.

Logistische Daten

	Stück	Karton	Palette	EAN	PZN
Stück	1	6	720	5703538430671	15999848
Karton	-	1	120	5703538430688	-
Palette	-	-	1	5703538431258	-

	Breite cm	Länge cm	Höhe cm	Bruttogewicht kg
Stück	10	4,5	26,5	0,51
Karton	20	16	27	3,21
Palette	80	120	150	410,20

Lagerung und Haltbarkeit

Behältnisse gut verschlossen halten. Haltbarkeit 3 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate.

Symbolerklärungen